

Alcon

Alles über die
**Handhabung
und Pflege**
von Alcon Kontaktlinsen



Handhabung von Kontaktlinsen	4
Sicherheitshinweise	9
Fragen und Antworten	10
Kontaktlinsenpflegemittel von Alcon®	12
Ein-Tages-Kontaktlinsen und Monatslinsen von Alcon®	16
Ein-Tages-Kontaktlinsen von Alcon®	18
Monats-Kontaktlinsen von Alcon®	20
Farblinsen von Alcon®	21
Benetzungstropfen für die Augen	22
Begeisterungs-Garantie	24
Anpass-Zertifikat	31

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Produkt von Alcon® und damit für modernes Kontaktlinsentragen und gutes Sehen entschieden.

Alcon® ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen und Pflegemitteln, der auf beiden Gebieten forscht, entwickelt und produziert. Das Ergebnis dieser umfassenden Erfahrungen: ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Produkte.

Damit sich Ihre Augen wohlfühlen, ist es wichtig, dass Kontaktlinsen, Pflegemittel und Augentropfen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Denn Ihre Augen sind hochempfindliche Sinnesorgane – jedes ist anders und so individuell wie ein Fingerabdruck.

Entscheidend für dauerhaft erfolgreiches Kontaktlinsentragen sind aber nicht die Kontaktlinsen und Pflegemittel allein. Tragekomfort und Sehschärfe hängen von vielen Faktoren ab. Ihr Anpasser bietet Ihnen deshalb neben Kontaktlinsen und Pflegemitteln einen ganz persönlichen Service – von der Beratung über die Anpassung bis hin zur regelmäßigen Nachbetreuung.

Erst mit dem umfassenden Service Ihres Anpassers können Ihre Kontaktlinsen tagtäglich das leisten, was Sie von ihnen erwarten. So können Sie sich darauf verlassen: Ihre Augen sind mit Alcon® Produkten ausgezeichnet versorgt.

Vorbereitung für das Auf- und Absetzen Ihrer Kontaktlinsen

- Für das Aufsetzen frischer Linsen stellen Sie Ihre Kontaktlinsenpackungen bereit – bei unterschiedlicher Dioptrienstärke markieren Sie die rechte und die linke Packung, um eine Verwechslung auszuschließen.
- Waschen Sie sich gründlich die Hände und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen.
- Verwenden Sie nur Kontaktlinsen aus original versiegelten Behältern. Beachten Sie dabei das Verfallsdatum.
- Schütteln Sie vor dem Öffnen leicht die Blisterpackung. Ziehen Sie dann den Foliendeckel ab. Lassen Sie die Linse vorsichtig aus dem Blister auf Ihre Handfläche gleiten und danach die Flüssigkeit ablaufen. Nur die Kontaktlinse bleibt auf der Handfläche zurück.
- Prüfen Sie die Linse vor dem Aufsetzen und vergewissern Sie sich, dass die Linse nicht beschädigt oder umgestülpt ist.



Richtig



Die Linsenränder wölben sich zueinander.



Falsch



Die Linse legt sich an die Fingerspitzen an. In diesem Fall stülpen Sie die Linse einfach um.

Aufsetzen von Kontaktlinsen



- Hände waschen und sorgfältig abtrocknen
- Kontaktlinse auf den rechten Zeigefinger legen
- Mit dem Mittelfinger der rechten Hand das Unterlid nach unten ziehen
- Oberlid mit Mittel- oder Zeigefinger der linken Hand nach oben ziehen



- Kontaktlinse auf das Auge setzen
- In verschiedene Richtungen blicken und dabei das Auge aufhalten
- Erst wenn die Kontaktlinse sitzt, Lid langsam schließen

Abnehmen von Kontaktlinsen



- Hände waschen und sorgfältig abtrocknen
- Blick geradeaus
- Unterlid mit dem rechten Mittelfinger leicht herunterziehen
- Oberlid mit Mittelfinger der linken Hand festhalten



- Mit dem rechten Zeigefinger Kontaktlinse nach unten, auf den weißen Teil des Auges, ziehen
- Dabei nach oben schauen



- Kontaktlinse mit Daumen und Zeigefinger vom Auge abfalten

Die Pflege von Kontaktlinsen ist wichtig. Bitte beachten Sie auch die Informationen zu Pflegemitteln und deren Anwendung.

Die richtige Entsorgung



Getragene Kontaktlinsen sollten immer im Restmüll entsorgt werden und nicht über die Toilette oder den Abfluss.

Die Kontaktlinsenblister, also die einzelnen Verpackungen der Kontaktlinsen, können über den gelben Sack entsorgt und somit recycelt werden. Idealerweise trennen Sie hierfür die Folie vom Blister, da diese im Restmüll zu entsorgen ist.

Leere Pflegemittelflaschen und Behälter von Augentropfen sowie die Kontaktlinsenbehälter der OPTI-FREE® Familie gehören als Verpackungsmaterialien ebenfalls in den gelben Sack. Den Kontaktlinsenbehälter von AOSEPT® Produkten bitte im Restmüll entsorgen.

Umverpackungen aus Kartonage werden korrekt in der Papiertonne entsorgt.


Schminken mit Kontaktlinsen

Auf Make-up brauchen Sie als Kontaktlinsenträger nicht zu verzichten. Setzen Sie Ihre Kontaktlinsen auf und beginnen Sie dann mit dem Schminken – aber seien Sie bitte vorsichtig:

Achten Sie darauf, dass keine Kosmetika in das Auge gelangen.

Bei Kajal- und anderen Lidstrichstiften gilt: Tragen Sie den Lidstrich nur unter der Wimpernlinie auf. An der Innenseite des Lids würden die Kosmetika winzige Poren verstopfen und die Kontaktlinsen verunreinigen.

 **Richtig**

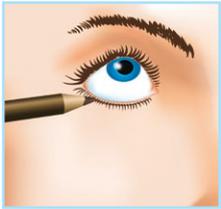

 **Falsch**



Auch beim Abschminken ist etwas Vorsicht angebracht – besonders bei fetthaltigen Emulsionen. Es ist deshalb ratsam, zuerst die Linsen abzunehmen und fettfreie, wasserlösliche Make-up-Entferner zu benutzen. Erkundigen Sie sich beim Kauf von Kosmetika, ob diese für Kontaktlinsenträger geeignet sind.

Sicherheitshinweise

Hinweise zum sicheren Über-Nacht-Tragen Ihrer AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® und AIR OPTIX® AQUA Kontaktlinsen nach Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenanpasser.

- **Stellen Sie sich jeden Morgen und Abend die drei folgenden Fragen:**
 - Sehe ich so gut wie gewohnt?
 - Fühlen sich meine Kontaktlinsen angenehm an?
 - Sind meine Augen klar und völlig reizfrei?

Können Sie eine oder mehrere dieser Fragen nicht mit Ja beantworten, nehmen Sie die Kontaktlinsen vom Auge, unterbrechen Sie das Tragen und kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten und lassen Sie sich eine ausführliche Gebrauchsanweisung aushändigen.

- **Am Abend:** Behalten Sie auf keinen Fall Kontaktlinsen, die am Auge stören, zum Schlafen auf.
- **Am Morgen:** Verspüren Sie in den ersten Minuten ein leichtes Trockenheitsgefühl, ist dies unbedenklich, sofern es bald verschwindet. Hält dieses Gefühl länger als drei Minuten an, können Sie Ihre Augen und Kontaktlinsen mit speziellen Nachbenetzungstropfen befeuchten.

Tritt auch dadurch keine Besserung ein, nehmen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen vom Auge und kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Wenn Sie kurz nach dem Aufsetzen auf einem oder auf beiden Augen verschwommen sehen, was tun?

Es kann sein, dass Sie die Kontaktlinsen verwechselt oder umgestülpt aufgesetzt haben.

Zuerst Hände mit Seife waschen und gründlich abtrocknen, Kontaktlinsen abnehmen, umstülpen oder austauschen. Mit steriler Kochsalzlösung abspülen, wieder aufsetzen. Bleibt das Problem bestehen, eine neue Linse aufsetzen.

Wenn die Kontaktlinse drückt oder reibt, was tun?

Es kann sich ein Fremdkörper zwischen Augenvorderfläche und Kontaktlinse befinden. Zuerst Hände mit Seife waschen und gründlich abtrocknen, Kontaktlinse sanft seitwärts und wieder zurückschieben. Bei stärkerem Reiben Kontaktlinse abnehmen, gründlich mit steriler Kochsalzlösung abspülen und gegebenenfalls manuell reinigen. Danach wieder aufsetzen.

Wenn das Auge kurz nach dem Aufsetzen juckt, was tun?

Eventuell sind trotz Händewaschens einige Verunreinigungen an die Linse gelangt. Hände nochmals gründlich mit Seife waschen und abtrocknen, Kontaktlinse abnehmen, gründlich mit steriler Kochsalzlösung abspülen und wieder aufsetzen.

Wenn die Kontaktlinse beschädigt ist, was tun?

Werfen Sie die Kontaktlinse weg und ersetzen Sie sie durch eine neue.

Wenn die Augen trocken sind, z. B. durch Klimaanlage oder nach längerem angestrengtem Schauen, was tun?

Bewusst häufiger blinzeln oder mit Nachbenetzungstropfen befeuchten.

Wenn die Kontaktlinse verrutscht ist, was tun?

Ein Verrutschen der Kontaktlinse ist kein Grund zur Beunruhigung: Es ist völlig ausgeschlossen, dass die Kontaktlinse etwa „hinter dem Auge verschwindet“. Waschen Sie zuerst Ihre Hände und trocknen Sie sie ab. Tasten Sie bei geschlossenen Lidern das Auge ab und machen Sie die Kontaktlinse ausfindig. Schauen Sie in die entgegengesetzte Richtung und massieren Sie bei geschlossenen Lidern die Kontaktlinse vorsichtig in Richtung Pupille.

Wenn eine der Beschwerden bleibt oder wenn ein Auge häufig oder ununterbrochen gerötet ist, Kontaktlinsen abnehmen und Ihren Kontaktlinsenanpasser aufsuchen.

Bitte fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser nach den ausführlichen Gebrauchsanweisungen. Diese sind auch auf der Website ifu.alcon.com verfügbar. Durch das Scannen des QR-Codes werden Sie direkt dorthin verlinkt.



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Website mit den Gebrauchsanweisungen zu gelangen. Wählen Sie Ihr Land aus. Klicken Sie auf den Tab Kontaktlinsen und suchen Sie nach den gewünschten Produktmarken.

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® – die kraftvolle Lösung

Kontaktlinsen und Pflegemittel gehören zusammen und sollten deshalb aufeinander abgestimmt sein, um einen langfristigen Tragekomfort zu ermöglichen.

Das bewährte Kontaktlinsenpflegemittel, jetzt auch mit eigens entwickelter HydraGlyde® Moisture Matrix* Technologie

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®
Die kraftvolle DREIFACH-Reinigung und zuverlässige Desinfektionsleistung von AOSEPT® PLUS **für schonende Tiefenreinigung ohne Konservierungsstoffe.**¹

Optimierte Feuchtigkeitsbindung und verbesserte Benetzung Ihrer Kontaktlinsen für einen **lang anhaltenden Tragekomfort.**^{2,3}


Tipps:

- Niemals nicht-neutralisierte Peroxid-Lösung an das Auge bringen
- Niemals Leitungswasser verwenden
- Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche AOSEPT® austauschen
- AOSEPT® gemäß der Pflegeanleitung verwenden



* Feuchtigkeitsmatrix | 1. Kiel JE. Protein removal from soft contact lenses using disinfection/neutralization with hydrogen peroxide catalytic disc. ClinTher. 1993;15(1):30-35. 2. Muya L, Scott A, Alvord L et al. Wetting substantivity of a new hydrogen peroxide disinfecting solution on silicone hydrogel contact lenses. Poster presented at the 39th BCLA, Liverpool May 2015. 3. Lemp J et al. Comparison of two step hydrogen peroxide lens care solutions in symptomatic contact lens wearers. Unveröffentlichte Alcon Studie, TDOC-0051197. 05.08.2015.

AOSEPT® – die Anwendung

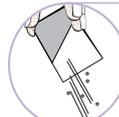 <p>1. Vor dem Abnehmen: Hände waschen Hände gründlich waschen und gut trocknen.</p>	 <p>6. Einlagerung und Neutralisation Linsen mindestens 6 Stunden in der Lösung lassen.</p>
 <p>2. Linsen abnehmen</p>	 <p>7. Vor dem Aufsetzen: Hände waschen Hände gründlich waschen und gut trocknen.</p>
 <p>3. Im Behälter platzieren Rechte und linke Linse in die entsprechenden Körbchen einlegen.</p>	 <p>8. Linsen aufsetzen Bei Bedarf Linsen mit Kochsalzlösung (nicht AOSEPT®) abspülen und aufsetzen.</p>
 <p>4. Power-Dusche Linsen im Körbchen 5 Sekunden mit AOSEPT® abspülen.</p>	 <p>9. Lösung ausgießen Behälter ausgießen, mit Kochsalzlösung ausspülen und an der Luft trocknen lassen.</p>
 <p>5. Behälter befüllen Behälter bis zum Markierstrich mit AOSEPT® füllen und verschließen.</p>	<p>Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung in jeder AOSEPT® Packung.</p>

OPTI-FREE® PureMoist® – die flexible Lösung

Kontaktlinsen und Pflegemittel gehören zusammen und sollten deshalb aufeinander abgestimmt sein, um einen langfristigen Tragekomfort zu ermöglichen.

Das Pflegemittel für besonders lang anhaltenden Tragekomfort, speziell für moderne (Silikon-Hydrogel-) Kontaktlinsen entwickelt.



OPTI-FREE® PureMoist®

Die einzige Multifunktions-Desinfektionslösung mit der HydraGlyde® Moisture Matrix*, die die Kontaktlinsenoberfläche mit einem Feuchtigkeitskissen umhüllt und so für **lang anhaltenden Tragekomfort** sorgt.⁴

Nur eine flexible Lösung zum

- Reinigen
- Abspülen
- Desinfizieren
- Aufbewahren

Tipps:


- Niemals Leitungswasser verwenden
- Kontaktlinsenbehälter regelmäßig austauschen
- OPTI-FREE® PureMoist® gemäß der Pflegeanleitung verwenden

OPTI-FREE® PureMoist® – die Anwendung



1. Vor dem Abnehmen: Hände waschen

Hände gründlich waschen und gut trocknen.

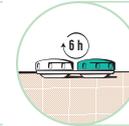

6. Einlagerung

Linsen über Nacht, mindestens aber 6 Stunden in OPTI-FREE® PureMoist® lassen.



2. Linsen abnehmen



7. Vor dem Aufsetzen: Hände waschen

Hände gründlich waschen und gut trocknen.



3. Abreiben

Beide Seiten der Linsen gründlich mit OPTI-FREE® PureMoist® benetzen und 20 Sekunden reiben.



8. Linsen aufsetzen

Linsen gründlich mit OPTI-FREE® PureMoist® abspülen und aufsetzen.



4. Abspülen

Beide Seiten der Linsen 10 Sek. lang mit einem stetigen Strahl OPTI-FREE® PureMoist® abspülen.



9. Lösung ausgießen

Behälter ausgießen, mit OPTI-FREE® PureMoist® ausspülen und an der Luft trocknen lassen.



5. Im Behälter platzieren

Rechte und linke Linse in die entsprechenden Körbchen einlegen und frische Pflegelösung einfüllen.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung im Inneren der Packung.

* Feuchtigkeitsmatrix | 4. Lemp J., Kern J. R. (2013). Results from a global survey of contact lens-wearer satisfaction with OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution. Clinical Optometry, 5,39-46.

EIN-TAGES-KONTAKTLINSEN VON ALCON

DAILIES TOTAL1®

DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen sind entwickelt für Kontaktlinsenträger mit hohen Trageansprüchen. Durch den Wassergradienten haben sie fast 100 % Wasser an der Oberfläche.¹

Durch die **SmarTears™ Technologie** ist die Kontaktlinse auch nach 16 Stunden noch angenehm befeuchtet.²



DAILIES TOTAL1®
Für Kurz- und Weitsichtigkeit

**DAILIES TOTAL1®
for ASTIGMATISM**
Für Hornhautverkrümmung

**DAILIES TOTAL1®
MULTIFOCAL**
Für Alterssichtigkeit


1. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microheology. ARVO 2013. E-abstract 114872. 2. Maissa C., Nelson J., DeCenzo-Verbeten T., Kramer D.: Evaluation of the Lubricity of DAILIES TOTAL1® Contact Lenses After Wear. Optom Vis Sci 2014;91:E-abstract:145195.

MONATS-KONTAKTLINSEN VON ALCON

TOTAL30®

TOTAL30® Kontaktlinsen sind die ersten und einzigen Monatskontaktlinsen mit einem Wassergradienten. Mit innovativer **CELLIGENT™** Technologie, biomimetisch der Augenoberfläche nachempfunden.⁵

MIT NAHEZU **100 %
WASSERGEHALT**
AN DER LINSEN-OBERFLÄCHE
BERÜHRT IHRE AUGEN
NUR EIN SANFTES
FEUCHTIGKEITSKISSEN^{1,3-5}

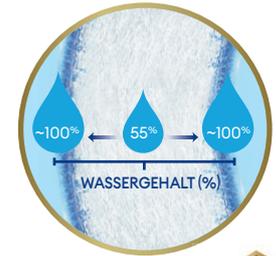

TOTAL30®
Für Kurz- und
Weitsichtigkeit

TOTAL30® for ASTIGMATISM
Für Hornhautverkrümmung




3. Tucker B. Surface characteristics of lehficon A. Unveröffentlichte Alcon Studie. A02491-REP-197506. Januar 2021. | 4. Oyer P. Outermost Surface Softness Analysis of lehficon A Contact Lenses. Unveröffentlichte interne Alcon Studie. A02491-REP-198231-1. 2021. | 5. Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a silicone hydrogel contact lens having bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539.

PRECISION1™

Entwickelt für Neuträger und bestehende Linsenträger mit dem Wunsch nach:

- scharfem Sehen¹⁻³
- lang anhaltendem Komfort¹⁻³
- einfacher Handhabung¹⁻³

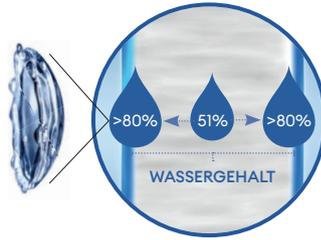

LANG ANHALTENDE EIGENSCHAFTEN*³

Mit SMARTSURFACE™ Technologie

16 STUNDEN⁴⁻⁶



PRECISION1™

Für Kurz- und Weitsichtigkeit



PRECISION1™

for Astigmatism

Für Hornhautverkrümmung



* Basierend auf der mittleren subjektiven Bewertung für Gesamtsehen, Gesamtkomfort und Gesamthandhabung bei Personen, die PRECISION1™ Kontaktlinsen tragen, gemessen bei einem Folgebesuch nach drei Monaten.
1. PRECISION1™ (DDT2) Lens with Smart Surface. Unveröffentlichte interne Alcon Studie. A01660-REP-044605. 02/2019. | **2.** Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Poster presented at Academy of Optometry Annual Meeting and 3rd World Congress of Optometry, October 23-27; Orlando, FL. | **3.** Perez-Gomez I, Valente R, Vonbun H. Survey of patient and ECP satisfaction with a new daily disposable toric contact lens. Poster presented at 2021 American Academy of Optometry Annual Meeting; November 3-6; Boston, MA.

DAILIES™ AquaComfort Plus™

GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Mit Lidschlag-aktivierter Feuchtigkeitstechnologie⁷

3 Feuchtigkeitsspender

DAILIES® AquaComfort Plus® Kontaktlinsen enthalten Feuchtigkeitsmoleküle, welche die Linsen den kompletten Tag befeuchten.^{7,8}

Entwickelt für preisbewusste Linsenträger, die

- die Bequemlichkeit einer Tageslinse auf einem hohen Niveau möchten.
- eine zuverlässige, bewährte und unkomplizierte Linse möchten, die ihrem Budget entspricht.



DAILIES™ AquaComfort Plus™

Für Kurz- und Weitsichtigkeit



DAILIES™ AquaComfort Plus™

TORIC

Für Hornhautverkrümmung



DAILIES™ AquaComfort Plus™

MULTIFOCAL

Für Alterssichtigkeit



4. Heinrich C, et. al. Subjective performance of verofilcon A daily disposable soft contact lens after 16 hours of wear. Poster presented at: The American Academy of Optometry Meeting, Boston MA, November 4, 2021. | **5.** Fogt J, Patton K. Long day wear experience with water surface daily disposable contact lenses. Clinical Optometry. 2022(14):93-99. | **6.** Hines B, et. al. Clinical subjective performance of two daily disposable toric soft contact lenses. Poster presented at: American Optometric Association, Chicago, June 15-18, 2022. **7.** Pruitt J, Lindley K, Winterton L. Triple-action moisturisers for increased comfort in daily disposable lenses. Optician, November 2007:27-28. **8.** Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of 'comfort enhanced' daily disposable soft contact lenses. Contact Lens & Anterior Eye. 2010; 33(2):88-92.

Die AIR OPTIX® Kontaktlinsenfamilie

Hochsauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen mit lang anhaltendem Tragekomfort von Tag 1 bis Tag 30!



AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Feuchtigkeitsspeichernd für langes, komfortables Tragen dank HydraGlyde® Moisture Matrix*2



AIR OPTIX® AQUA

Kontaktlinsenkomfort für eine Vielzahl von Lebensstilen



AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal

Die Gleitsichtkontaktlinse für stufenloses Sehen von nah bis fern*3



AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism

Komfort und klare Sicht*4 bei Hornhautverkrümmung



AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA

Für Nonstop-Tragen über 30 Tage und Nächte*5 (bei Eignung)



AIR OPTIX® COLORS

Natürlich schöne Farbveränderung mit oder ohne Sehkorrektur

*Basierend auf einer klinischen Studie, bei der AIR OPTIX® AQUA Kontaktlinsen mit Biofinity®, PureVision®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® ADVANCE und AVAIRA® Kontaktlinsen verglichen worden sind. **1.** Eiden SB, Davis RL, Bergenske PD. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens No 39: 290-294, 2013. **2.** Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafilcon B lenses packaged with a substantive wetting agent. Poster presented at Optometry's

Entdecken Sie die Vielfalt Ihrer Augenfarbe

Egal, für welchen Look Sie sich entscheiden, mit Freshlook® liegen Sie immer richtig! Es erwartet Sie eine große Auswahl an Farben und Möglichkeiten.



Freshlook® ONE-DAY COLOR

Für eine dezente Verstärkung Ihrer Augenfarbe

Ein-Tages-Linsen



Freshlook® COLORBLEND®

Für eine harmonische Farbveränderung dunkler und heller Augen

Monatslinsen

Verfügbar mit oder ohne Sehkorrektur. Sprechen Sie Ihren Augenoptiker einfach darauf an!

3-in-1 Farbtechnologie

Freshlook® COLORBLEND® und Freshlook® ONE-DAY COLOR zaubern ein natürliches Farbergebnis mit der 3-in-1-Technologie.



Meeting, the Annual Meeting of the American Optometric Association; June 21-25, 2017; Washington, D.C. **3.** McKenney C. Alcon Multifocal PRECISION Profile Contact Lens Design Intenses Alcon Memorandum. 12.04.2016. **4.** Brobst A. Performance comparison of two silicone hydrogel toric lenses. Internal Alcon Testbericht. 04.12.2008. **5.** Haque-Khan S, Ferzola N, Land J. Assessing the performance of lotrafilcon A lenses during a three month period. Unveröffentlichte interne Alcon Studie, 11.01.2010.


Fast 1,4 Milliarden Menschen weltweit leiden an Symptomen des Trockenen Auges¹

Wenn Sie an einem der unten aufgeführten Symptome leiden, könnten auch Sie dazugehören.^{2,3} Wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt, wenn Sie eines der Symptome bei sich feststellen:



Könnten Sie betroffen sein?*

1. Fixieren Sie die Zahlen.
2. Blinzeln Sie zweimal und beginnen Sie sofort nach dem zweiten Blinzeln mit dem Lesen der Zahlen.
3. Lesen Sie eine Zahl pro Sekunde, ohne dabei zu blinzeln.
4. Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl verspüren, hören Sie auf zu zählen.
5. Wenn Sie bereits vor der **10** aufhören müssen, könnte es sein, dass Sie unter trockenen Augen leiden.

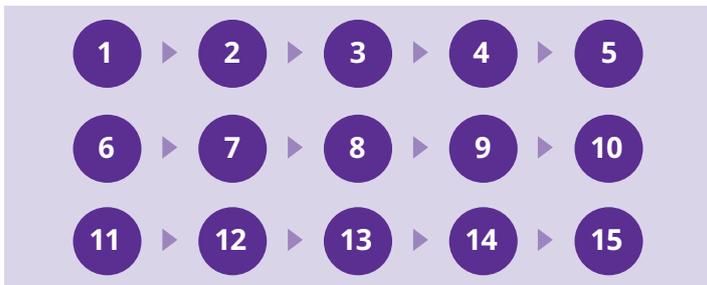

Systane® COMPLETE ohne Konservierungsmittel

All-in-One-Tropfen für alle Formen des Trockenen Auges⁵

Wenn Sie nicht wissen, an welcher Art des Trockenen Auges Sie leiden, entscheiden Sie sich für Systane® COMPLETE, die All-in-One-Lösung, die alle Schichten des Tränenfilms schützt.⁴

- Vor und nach dem Tragen von Kontaktlinsen



* Hinweis: Dieser Test ersetzt nicht die Diagnose durch Ihren Spezialisten, sondern gibt nur erste Hinweise, ob es sich bei Ihren Augenbeschwerden um ein Trockenes Auge handeln könnte oder nicht. Zur genauen Abklärung der Symptome sollten Sie bitte einen Spezialisten aufsuchen.

1. MarketScope LLC. 2020 Dry Eye Products Market Report: A Global Market Analysis for 2019 to 2025. St. Louis, MO: MarketScope LLC; 2020. 2. MarketScope LLC. 2019 Bericht über Produkte für das Trockene Auge: Eine Analyse des Weltmarkts für 2018 bis 2024. St. Louis, MO: MarketScope LLC; 2019. 3. Craig JP, Nelson JD, Azar DT, et al. Kurzfassung TFOS DEWS II- Bericht. The Ocular Surface. 15(2017):802-812. 4. Guillon M, Patel K, Gupta R, Srinivasan S. Sustained symptom relief following a single dose of PG/HPG-nanoemulsion in patients with Dry Eye disease. Posterpräsentation anlässlich der Jahrestagung der American Academy of Optometry, Oktober 23-26, 2019, Orlando FL. 5. Silverstein S, Yeu E, Tauber J, et al. Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol-Hydroxypropyl Guar Nanoemulsion in Patients with Dry Eye Disease: A Phase IV, Multicenter Trial. Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177.

Beachten Sie die Packungsinformation mit vollständigen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen.

AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® und Systane® COMPLETE – begeistert sein oder Geld zurück

Die Begeisterungs-Garantie gibt Ihnen als Neukunden von AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE das gute Gefühl, alles richtig gemacht zu haben: Sollten Sie mit Ihrem neuen Pflegemittel oder Ihren neuen Benetzungstropfen für die Augen nicht rundum zufrieden sein, bekommen Sie für das gekaufte Produkt Ihr Geld zurück.

Und was, wenn Sie die Begeisterung nicht mit uns teilen?

- Wenden Sie sich an Ihren Augenoptiker, Fachberater oder Augenarzt.
- Besprechen Sie mit ihm, warum Sie AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE nicht überzeugt hat.
- Sie sind immer noch nicht begeistert? Bitte füllen Sie den beigegefügteten Garantie-Scheck aus.
- Senden Sie den Scheck und die Originalrechnung Ihres Pflegemittelkaufs sowie Ihr Pflegemittel oder Ihre Benetzungstropfen an die DOCUssystem GmbH (bitte notwendige zurückzusendende Mindestmenge auf Seite 25 beachten).

Bitte beachten Sie:

- Die Begeisterungs-Garantie gilt nur einmalig für Neuverwender von AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE, die zuvor fachgerecht beraten wurden.
- Die Garantie umfasst nicht die Erstattung eventuell angefallener Beratungs- oder Servicegebühren.
- Alle weiteren Bedingungen der Inanspruchnahme entnehmen Sie bitte dieser Broschüre.



Bedingungen für die Inanspruchnahme der Begeisterungs-Garantie

Alcon® ist überzeugt, dass Sie nach einer Beratung durch den Augenoptiker, Fachberater oder Augenarzt und bei Beachtung ihrer Anweisungen sowie der Gebrauchsanweisung mit AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE zufrieden sind.

1. AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE Begeisterungs-Garantie: **a)** Sofern Sie mit AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE nicht zufrieden waren, senden Sie bitte den vollständig ausgefüllten Garantie-Scheck zusammen mit dem Original-Kassenbon und der Mindestmenge (siehe Punkt 1b) des zurückzusendenden Pflegemittels oder der Benetzungstropfen an den Alcon® Servicepartner DOCUssystem GmbH, Kennwort: Begeisterungs-Garantie, Rudolf-Diesel-Straße 4, 63322 Rödermark.

b) Erstattet wird der Kaufpreis für eine gekaufte Packung AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE (5 ml oder 10 ml). Die zurückzusendende Mindestmenge beträgt eine 360-ml-Flasche AOSEPT® oder eine 300-ml-Flasche OPTI-FREE® PureMoist®, die noch mindestens zur Hälfte gefüllt sein muss (beim Kauf eines Doppelpacks oder Viererpacks auch die restlichen, noch verschlossenen Flaschen zurücksenden) bzw. eine angebrochene 5-ml- oder 10-ml-Flasche Systane® COMPLETE, die noch mindestens bis zur Hälfte gefüllt sein muss.

2. Bedingungen für die Inanspruchnahme der Alcon® Begeisterungs-Garantie: **a)** Alcon® erstattet Ihnen den Kaufpreis für AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE innerhalb von 4 Wochen durch Überweisung auf Ihr angegebenes Bankkonto. **b)** Diese Garantie gilt nur für Neuverwender von AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE. Die Begeisterungs-Garantie kann nur einmal und nur für AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE in Anspruch genommen werden. **c)** Vor dem Erstkauf von AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE müssen Sie sich fachgerecht beraten lassen. Die Garantie umfasst nur die Kosten des Pflegemittels. Etwaige Beratungs- oder Servicegebühren werden nicht erstattet.

Bedingungen für die Inanspruchnahme der Begeisterungs-Garantie für Kontaktlinsen

1. DAILIES® und PRECISION1™ Begeisterungs-Garantie: a) Die Begeisterungs-Garantie für Alcon® Ein-Tages-Kontaktlinsen umfasst folgende Kontaktlinsen: DAILIES TOTAL1®, DAILIES TOTAL1® for Astigmatism, DAILIES TOTAL1® Multifocal, PRECISION1™, PRECISION1™ for Astigmatism, DAILIES™ AquaComfort Plus™, DAILIES™ AquaComfort Plus™ Toric, DAILIES™ AquaComfort Plus™ Multifocal. b) Sofern Sie mit Ihren neuen DAILIES® oder PRECISION1™ Kontaktlinsen nicht zufrieden waren, senden Sie bitte den vollständig ausgefüllten Garantie-Scheck zusammen mit dem Original-Kassenbon und der Mindestmenge (siehe Punkt 1 c) der zurückzusendenden Alcon® Ein-Tages-Kontaktlinsen an unseren Servicepartner DOCUssystem GmbH, Kennwort: Begeisterungs-Garantie, Rudolf-Diesel-Straße 4, 63322 Rödermark, Deutschland. c) Erstattet wird der Kaufpreis für eine gekaufte Packung® Ein-Tages-Kontaktlinsen (maximal 90 Stück) pro Auge. Die zurückzusendende Mindestmenge beträgt bei 30er-Packungen 25 Kontaktlinsen und bei 90er-Packungen 85 Kontaktlinsen.

2. AIR OPTIX® und TOTAL30® Begeisterungs-Garantie: a) Die Alcon® Begeisterungs-Garantie für AIR OPTIX® umfasst folgende Kontaktlinsen: TOTAL30®, TOTAL30® for Astigmatism, AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism, AIR OPTIX® AQUA oder AIR OPTIX® COLORS. b) Sofern Sie mit Ihren neuen AIR OPTIX® Kontaktlinsen nicht zufrieden waren, senden Sie bitte den vollständig ausgefüllten Garantie-Scheck zusammen mit dem Original-Kassenbon und der Mindestmenge (siehe Punkt 2 c) der zurückzusendenden Kontaktlinsen an den Alcon® Servicepartner DOCUssystem GmbH, Kennwort: AIR OPTIX® Begeisterungs-Garantie, Rudolf-Diesel-Straße 4, 63322 Rödermark, Deutschland. c) Erstattet wird der Kaufpreis für eine gekaufte Packung AIR OPTIX® (maximal 6 Stück) pro Auge. Die zurückzusendende Mindestmenge beträgt bei AIR OPTIX® 3er-Packungen 2 Kontaktlinsen und bei AIR OPTIX® 6er-Packungen 5 Kontaktlinsen.

3. Allgemeine Bedingungen: a) Alcon® erstattet Ihnen den Kaufpreis für die Packungen innerhalb von 4 Wochen durch Überweisung auf Ihr angegebenes Bankkonto. b) Diese Garantie gilt nur für Neuträger eines der unter Ziffer 1 und Ziffer 2 aufgeführten Produkte. Die Begeisterungs-Garantie kann nur einmal und nur von einem Neuträger in Anspruch genommen werden. Alcon® behält sich vor, ohne Angaben von Gründen diese Garantie jederzeit zu beenden. Grundsätzlich kann die Garantie nur an volljährige Personen ausgezahlt werden, ausnahmsweise ist mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten die Auszahlung auch an Personen unter 18 Jahren möglich. c) Die Garantie wird nur Neuträgern der oben unter Ziffer 1 und Ziffer 2 aufgeführten Produkte gewährt. Eine Beratung und Anpassung der Kontaktlinsen wird dringend empfohlen. Die Garantie umfasst nur die Rückerstattung der Kosten für die Kontaktlinsen.



Garantie-Scheck AOSEPT®, OPTI-FREE® PureMoist® oder Systane® COMPLETE

Name /Vorname:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Land:

Telefonnummer:

Warenrücksendung:

Bitte tragen Sie die Anzahl ein.

	360 ml	2 x 360 ml	4 x 360 ml
AOSEPT® PLUS
AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®
	300 ml	2 x 300 ml	4 x 300 ml
OPTI-FREE® PureMoist®
	5 ml	10 ml	
Systane® COMPLETE	



Gekauft am:

Zurückgeforderter Betrag:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Hiermit bestätige ich, dass ich Neuträger eines der oben genannten Produkte bin und erstmals die Begeisterungs-Garantie bezogen auf dieses Produkt in Anspruch nehme. Ich erkläre mich mit den Bedingungen (Datenschutz sowie Garantiebedingungen) einverstanden.

.....
Datum und Unterschrift des Verwenders
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Datenschutzrechtliche Information

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Alcon® Deutschland GmbH, Freiburg im Breisgau, Deutschland; www.de.alcon.com. Für weitere Kontaktinformationen besuchen Sie uns gerne auf unserer Website. Bei Fragen oder Beschwerden zur Einhaltung dieser Datenschutzgrundsätze sowie für Kommentare und Verbesserungsvorschläge schreiben Sie uns bitte per E-Mail unter anfragen.datenschutz@alcon.com oder wenden Sie sich gern an unseren Beauftragten für den Datenschutz MKM Datenschutz GmbH, Äußere Sulzbacher Str. 124a, 90491 Nürnberg, E-Mail: datenschutz@mkm-partner.de.

Ihre personenbezogenen Daten werden lediglich zum Zwecke der Abwicklung der Warenrücksendung, der Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rücknahme vorliegen, und der Überweisung des Geldbetrages verwendet. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ablauf gesetzlicher und sonstiger Aufbewahrungspflichten gelöscht. Auf dem uns zur Verfügung gestellten Kassenbon sind alle personenbezogenen Daten zu schwärzen, andernfalls bedarf es der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung zur Übermittlung an Alcon®. Alle in diesem Zusammenhang beauftragten Dienstleister wurden entsprechend vertraglich als Auftragsverarbeiter verpflichtet. Sie haben gegenüber Alcon® im gesetzlichen Umfang folgende Rechte hinsichtlich der betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit. Ferner haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch Alcon® zu beschweren.

Jetzt mit DAILIES®, TOTAL30®, PRECISION1™ oder AIR OPTIX® starten und begeistert sein – oder Geld zurück

Die Alcon® Begeisterungs-Garantie gibt Ihnen als Neuträger eines Produkts unserer DAILIES®, PRECISION1™ oder AIR OPTIX® Familie das gute Gefühl, alles richtig gemacht zu haben: Sollten Sie mit Ihren neuen Kontaktlinsen nicht rundum zufrieden sein, bekommen Sie für die gekauften Kontaktlinsen das Geld zurück.

Und was, wenn Sie die Begeisterung nicht mit uns teilen?

- Wenden Sie sich an Ihren Augenoptiker oder Augenarzt.
- Besprechen Sie mit ihm, warum Sie DAILIES®, TOTAL30®, PRECISION1™ oder AIR OPTIX® Kontaktlinsen nicht überzeugt haben.
- Sie sind immer noch nicht begeistert? Bitte füllen Sie den beigefügten Garantie-Scheck aus.
- Senden Sie den Scheck und die Originalrechnung Ihres Kontaktlinsenkaufs sowie Ihre Kontaktlinsen an die DOCUSystem GmbH (bitte notwendige zurückzusendende Mindestmenge auf Seite 26 beachten).

BEGEISTERUNGS-GARANTIE-SCHECK

Name /Vorname:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Land:

Telefonnummer:



Rücksendung der DAILIES®, PRECISION1™, TOTAL30® oder AIR OPTIX® Packungen

Anzahl 30er-Packungen Kontaktlinsen
 90er-Packungen Kontaktlinsen
 3er-Packungen Kontaktlinsen
 6er-Packungen Kontaktlinsen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> DAILIES TOTAL1® | <input type="checkbox"/> TOTAL30® |
| <input type="checkbox"/> DAILIES TOTAL1® for ASTIGMATISM | <input type="checkbox"/> TOTAL30® for ASTIGMATISM |
| <input type="checkbox"/> DAILIES TOTAL1® Multifocal | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® plus HydraGlyde® |
| <input type="checkbox"/> PRECISION1™ | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® plus HydraGlyde®
for Astigmatism |
| <input type="checkbox"/> PRECISION1™ for ASTIGMATISM | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® plus HydraGlyde®
Multifocal |
| <input type="checkbox"/> DAILIES™ AquaComfort Plus™ | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® AQUA |
| <input type="checkbox"/> DAILIES™ AquaComfort Plus™ Toric | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® COLORS |
| <input type="checkbox"/> DAILIES™ AquaComfort Plus™ Multifocal | <input type="checkbox"/> AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA |

Hiermit bestätige ich, dass ich Neuträger einer der oben genannten Kontaktlinsen bin und erstmals die Begeisterungs-Garantie bezogen auf diese Kontaktlinse in Anspruch nehme. Ich erkläre mich mit den Bedingungen (Datenschutz sowie Garantiebedingungen) einverstanden.

Gekauft am: Zurückgeforderter Betrag:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

.....
Datum und Unterschrift des Kontaktlinsenverwenders
(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

ANPASS-ZERTIFIKAT

Ihr persönliches Anpass-Zertifikat für Ihre Unterlagen

Kontaktlinsenträger:

Kontaktlinsentyp:

Ch.-B./LOT:

Pflegemittel:

Ihre persönliche, vom Anpasser empfohlene Tragezeit:

maximal Stunden pro Tag

Nachkontrollen:

Regelmäßige Nachkontrollen sind wichtig. Sie sind entscheidend für dauerhaft erfolgreiches Kontaktlinsentragen. Sie sollten sie im eigenen Interesse einhalten. Mindestens 2 Nachkontrollen pro Jahr sollten sein!

Nächster Termin mit Ihrem Kontaktlinsenanpasser:

am Uhrzeit

Ihr Kontaktlinsenanpasser:

Bitte fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser nach den ausführlichen Gebrauchsanweisungen. Diese sind auch auf der Website ifu.alcon.com verfügbar. Durch das Scannen des QR-Codes werden Sie direkt dorthin verlinkt.



Beachten Sie die Packungsinformationen mit vollständigen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen.

Alcon Deutschland GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17,
D-79100 Freiburg im Breisgau; Tel: +49 (0) 761 1304-0;
E-Mail: kontakt.deutschland@alcon.com; www.de.alcon.com
Geschäftsführer: Dr. Benedikt Hoffmann, Dr. Ege Bay
DE-T30-2200026; 900457810 - 01/2023 © 2023 Alcon

Alcon